


Qorpus Vita Draglakan med inkontinensskydd kan användas av personer med inkontinens. Produkten är även ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonalen för att positionera och förflytta patienter i sidled. Vid förflyttning, låt bäddflikarna hänga ner på sidorna och ta tag i vingarna på vardera sidan för ett stadigt tag och en säker förflyttning. När positioneringen är avslutad ska bäddflikarna bäddas in under madrassen. Produkten har en absorberande yta som suger upp vätska och ett spärrskikt i botten som skyddar madrassen för att bli blöt vid ett eventuellt läckage. Draglakanet kan användas tillsammans med ett glidlakan för att det ska bli lättare att positionera tunga brukare.



Benämning	Draglakan med inkontinensskydd, B220xL100cm, grått
Varumärke	Qorpus Vita
Art nr	1086
Totalyta	B220 x L 100 cm
Absorberande yta	B90 x L100 cm
Till sängbredd	90 cm
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	1537 ml (+/- 43 ml)
Färg	Grå/Vit
Antal produkter/förpackning	1 st
Material:	
Liggyta	50% Bomull, 50% Polyester
Absorptionsskikt	90% Polyester, 5% Rayon
Spärrskikt	100% Polyuretan
Undersida	100% Polyester
Bäddflikar	65% Bomull, 35% Polyester
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	ca 450 st
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

Användaranvisning

- Placera draglakanet i sängen med den absorberande ytan uppåt. Används draglakanet tillsammans med ett glidlakan placeras draglakanet ovanpå glidlakanet.
- Med ett stadigt tag i draglakanet förflyttar man brukaren i sängen.
- När positioneringen är klar skall alltid draglakanet bäddas fast under madrassen med hjälp av vingarna.
- Brukaren ska ligga direkt på draglakanet.
- Produkterna är märkta med anvisning för hur draglakanet skall bäddas i sängen för rätt funktion och säkerhet.

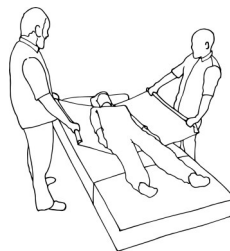

Produkten får ej användas till att lyfta personer med. Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Används draglakan tillsammans med glidlakan skall man observera att det finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Bädda alltid in bäddflikarna. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemiddelsverket.

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvåtrådd



Max: 200 kg

Max brukarvikt



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 1086



SRN SE-MF-000033314