









Stödkäpp Resnätt, hopfällbar  
Rörelsehjälpmedel • Stödkäppar

Art nr: 124205

**Avsedd användning:** Stödkäppen är avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Benämning	Stödkäpp, hopfällbar
Art nr	124205
Ställbar höjd	87-97 cm
Längd hopfälld	30 cm
Vikt	0,34 kg
Tillbehör	Art nr 123300, isdubb spets Art nr 123350, isdubb kronan Art nr 124885, käpphållare Flex
Reservdelar	Art nr 120750, doppsko
Material	Aluminiumrör, PP (handtag), naturgummi (doppsko)
Förvaring	Rumstemperatur
Teknisk livslängd	3 år under förutsättning att regelbundna kontroller och service utförs
Återvinning	Metallskrot och plastavfall. Sorteras efter lokal anvisning
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas av Swereco vid förfrågan




<b>Symboler:</b>		<b>Användaranvisning</b>
	Produktens partinummer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkten ska ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.</li> <li>• Konsultera sjukvård innan användandet.</li> <li>• Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.</li> <li>• Stödkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.</li> <li>• Fastnar doppskon i underlaget skall stor försiktighet iakttas, detta då käppen kan dela sig om man drar i den så pass hårt att stödkäppen går isär.</li> <li>• Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp, och skall bytas ut mot nya. Dessa kan beställas från Swereco.</li> <li>• Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.</li> <li>• Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttas.</li> <li>• Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är skadad eller utsliten ska produkten tas ur bruk.</li> <li>• Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.</li> </ul>
	Produktens utgångsdatum (3 års livslängd)	
	Produktens artikelnummer: 124205	
	Produkten är en medicinteknisk produkt	
	Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745	
	Konsultera bruksanvisning	
	Tillverkare: Swereco AB Vagnvägen 4 364 42 Lenhovda	
	SRN SE-MF-000033314	

Stödkäpp Resnätt, hopfällbar  
Rörelsehjälpmedel • Stödkäppar

Art nr: 124205

## Användaranvisning

- 1) Justera höjden för stödkäppen med hjälp av tryckknappen. Stödkäppens höjd skall anpassas efter den individuella brukaren.
- 2) Kontrollera tryckknappen för höjjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av stödkäppen genast avbrytas.
- 3) Kontrollera doppskorna före användning. Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya.

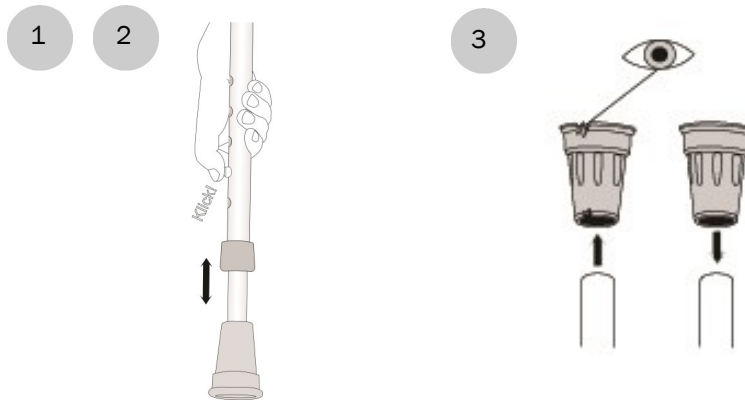

## Skötsel- och rekonditioneringsanvisning

Produkten ska rengöras regelbundet och vid behov med tvållösning, pH 5-9. Produkten kan även torkas med 70% isopropanol. Produkten skall **EJ** rengöras med etanol.

Vid rekonditionering ska produkten kontrolleras och utslitna eller skadade delar ska bytas ut.

Kan desinficeras i avsedd utrustning i 85 °C i 3 minuter. Produkten skall rekonditioneras mellan varje brukare eller oftare vid behov.

