

DUSCHSTOL ROBUST

Artikelnummer: 142140, 142143

Avsedd användning: Duschstol Robust är avsedd att sitta på vid duschning. Stolen har en stabil helsvetsad konstruktion av extra dimensionerade rör för att klara av tunga brukare. Sitsen består av ribbor i polyuretan, vilket gör den mycket stabil. Ryggstöd finns som tillbehör och beställs separat från Swereco.



142140



142140 + 142143

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Stolen är ej avsedd för att brukas i badkar.
- Stolen skall placeras på en plan yta där stolens alla fyra ben står stadigt mot golvet.
- Stolen får ej vinklas upp i sådant läge att den endast står på två ben då brukaren sitter i den. Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
- Stolen får ej förflyttas med brukaren sittandes i den.
- Stolen får kapas av behörig personal (hjälpmedelstekniker på hjälpmedelscentraler) utan att stolens egenskaper försämras. Stolens ben får kapas så stolen står plant från 55cm ner till 45 cm.
- Stödfötterna bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett försämrat grepp och ska bytas ut. Dessa kan beställas från Swereco.
- Om stolen ställs in i ett svagt framåtlutande läge är maximal höjdskillnad mellan fram och bakben 2.5 cm, vilket motsvaras av ett snäpp på beninställningen.
- Vid användning av ryggstöd, se till att ryggstödet är monterat enligt anvisning.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 300 kg

Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9.



max
85°C
3 min

Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Teknisk specifikation

Sitsens djup x bredd: 45x55 cm
Bredd mellan armstöd: 60 cm
Största bredd (yttermått): 66 cm
Vikt: 11,4 kg
Sitthöjd: 55 cm
Material: Stålrör, polyuretan (sits), TPE (stödfötter)
Max brukarvikt: 300 kg

Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

Skötsel­anvisningar:

Rengörs regelbundet vid behov (min 1 ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9.

Vid byte av brukare ska produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter.
Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.


Reserv­delar:

Art. nr 120702, Stödfot

Tillbehör:

Art. nr 142143, Ryggstöd till Duschstol Robust

För att montera fast ryggstödet följ anvisningarna nedan. Ritningarna visas i en vy underifrån stolen.

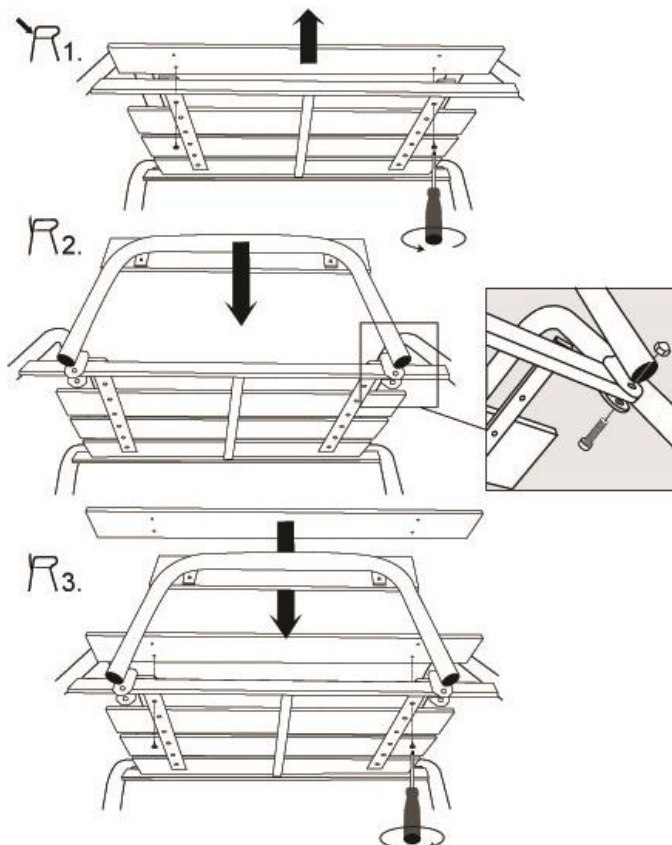

Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.