

**Avsedd användning** Säkerhetsprutan används för att injicera, alternativt extrahera, vätskor. Säkerhetsprutan är konstruerad för att minska risken för stickskador.

<b>Benämning</b>	Sol-Care 1 ml Säkerhetspruta med fast kanyl 27G x 1/2 (art nr 100019IM)
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur
<b>Återvinning</b>	Riskavfall, sorteras enligt lokal anvisning
<b>Övrig information</b>	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas av Swereco vid förfrågan

### Användaranvisning:

Säkerhetsmekanismen aktiveras när användaren drar in nålen i sprutans cylinder efter medicintillförel. Denna åtgärd täcker nålen och låser den på plats, förhindrar återanvändning och minskar risken för nålsticksskador.



1) **Tryck.** Efter injektion—tryck in kolven i sprutan. Tryck till stopp för att aktivera säkerhetsfunktionen.

2) **Dra.** Kanylen ska dras ner i sprutan så långt det går, till stopp. Detta markerar att kanylen är indragen och låst inuti sprutan.

3) **Bryt av.** Bryt av kolven. Detta säkerställer att sprutan inte kan återanvändas, och minimerar risken för stickskador.

<b>Symboler:</b>			Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745
	Produktens partinummer		Konsultera bruksanvisning
	Produktens utgångsdatum (5 års livslängd)		Tillverkare: Sol-Millennium Europe Sp. z o.o. Warsaw HUB, Rondo Daszyńskiego 2B 00-843 Warsaw, Poland
	Produktens artikelnummer: 100019IM		
	Produkten är en medicinteknisk produkt		