

Avsedd användning Säkerhetsprutan används för att injicera, alternativt extrahera, vätskor. Säkerhetsprutan är konstruerad för att minska risken för stickskador.

Benämning	Sol-Care Säkerhetspruta med fast kanyl
Förvaring	Rumstemperatur
Återvinning	Riskavfall, sorteras enligt lokal anvisning
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas av Swereco vid förfrågan

Användaranvisning:

Vid uppdragning av önskad dos av läkemedlet tryck inte kolven förbi noll-linjen, då aktiveras säkerhetsmekanismen. Säkerhetsmekanismen aktiveras och levererar full dos när användaren trycker kolven förbi noll-linjen och sedan drar in nålen i sprutans cylinder efter medicintillförsel. Denna åtgärd täcker nålen och låser den på plats, förhindrar återanvändning och minskar risken för nålsticksskador.










1) **Tryck.** Administrera läkemedlet—tryck in kolven till stopp förbi noll-linjen för att aktivera säkerhetsfunktionen och leverera full dos.



2) **Dra.** Kanylen ska dras ner i sprutan så långt det går, till stopp. Detta markerar att kanylen är indragen och låst inuti sprutan.



3) **Bryt av.** Bryt av kolven. Detta säkerställer att sprutan inte kan återanvändas, och minimerar risken för stickskador.

Symboler:			Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745
	Produktens partinummer		Konsultera bruksanvisning
	Produktens utgångsdatum (5 års livslängd)		Tillverkare: Sol-Millennium Europe Sp. z o.o. Warsaw HUB, Rondo Daszyńskiego 2B 00-843 Warsaw, Poland
	Produktens artikelnummer: 100034IM		
	Produkten är en medicinteknisk produkt		